

Инструкция по применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия
Суппозитории вагинальные ЛАКТАЦИД

Состав на один суппозиторий

Молочная кислота – 100 мг (в пересчете на 100% вещество);

Макрогол 400 – 60 мг;

Макрогол 1500 – до 3000 мг.

Описание изделия

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Показания к применению

Вагинальные суппозитории «Лактацид» предназначены для местного применения, интравагинально, с целью нормализации нарушенной микрофлоры рН влагалища, в том числе при бактериальном вагинозе (в составе комплексной терапии).

Молочная кислота является продуктом жизнедеятельности молочнокислых бактерий влагалища и является главным компонентом влагалищного секрета. Молочная кислота создает оптимальные условия для роста и развития нормальной микрофлоры влагалища, способствует повышению естественной защиты влагалища от инфекций.

Способ применения и дозы

Перед введением суппозитория необходимо тщательно вымыть руки, суппозиторий извлечь из контурной упаковки и ввести во влагалище в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах.

Один вагинальный суппозиторий вводят во влагалище один раз в сутки в течение 10 дней.

Особые указания

Суппозитории предназначены только для вагинального применения!

Не глотать!

Решение: N088807

Дата решения: 09.09.2025

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.

(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Учитывая тот факт, что молочная кислота является промежуточным продуктом метаболизма млекопитающих и в норме содержится в организме человека, в т.ч. в околоплодных водах, грудном молоке, применение изделия медицинского назначения «Лактацид» в период беременности и грудного вскармливания возможно после консультации с врачом.

Меры предосторожности

Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов изделия медицинского назначения.

При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции влагалища.

Если после применения суппозиториев произошло усиление неблагоприятных ощущений во влагалище или другие не наблюдавшиеся ранее симптомы и проявления на наружных половых органах, следует прекратить их использование и обратиться за консультацией к врачу.

Не следует использовать суппозитории при нарушении целостности упаковки.

Противопоказания

- кандидозный вульвовагинит;
- дети и подростки (до 18 лет).

Содержимое упаковки

5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

2 года.

Не применяйте изделие медицинского назначения после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Решение: N088807

Дата решения: 09.09.2025

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.

(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Наименование, юридический, (фактический) адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) производителя:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел.: +375 (212) 36-47-77; тел./факс: +375 (212) 36-37-06,
www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by

Наименование, юридический, (фактический) адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан:

Представительство ООО "Рубикон" в Республике Казахстан
Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, д.84, корп. А, офис 316, почтовый индекс 050000
Тел: +77079404917
Email: vrach-pharm@rambler.ru

Наименование и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан:

Представительство ООО "Рубикон" в Республике Казахстан
Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, д.84, корп. А, офис 316, почтовый индекс 050000
Тел: +77079404917
Email: vrach-pharm@rambler.ru

Последний пересмотр инструкции по медицинскому применению

XX.XX.XXXX

Решение: N088807

Дата решения: 09.09.2025

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.

(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)

Решение: N088807

Дата решения: 09.09.2025

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.

(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Решение: N088807

Дата решения: 09.09.2025

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Раймкулова Г. У.

(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе